


Am I Pregnant™

Prueba de embarazo de solo paso

Su Prueba de Embarazo

- ◆ **Sobre el 99% exacto cuando utilizado a partir del primer día de menstruación.**
- ◆ **Uso de probar desde 4 días antes de su menstruación prevista.**

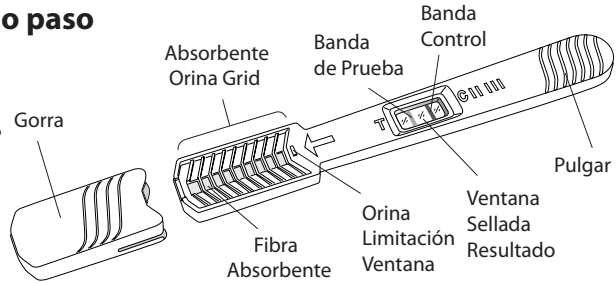

ANTES DE COMENZAR :

- Lea las instrucciones cuidadosamente y tenga un reloj o un contador de tiempo disponibles.
- No abra la bolsa hasta que esté listo para comenzar la prueba.
- Compruebe la fecha de vencimiento en la caja o la bolsa. No utilice si se expira.

CÓMO UTILIZAR LA PRUEBA



1. Si fue refrigerada. La prueba se debe traer a la temperatura ambiente antes de usar.
2. Abra la bolsa inmediatamente antes de la prueba. Saque el palillo de prueba de la bolsa. Quita el casquillo.
3. Sostenga el palillo por el apretón del pulgar. Apunte la rejilla absorbente hacia abajo con el frente de la rejilla para arriba en la corriente de la orina por 5 a 10 segundos hasta que la área de la rejilla este a fondo mojada.




IMPORTANTE: No orine en la ventana. Quita el palillo de la corriente de orina y mantenga la posición del palillo hacia abajo por varios segundos para dejar exceso de orina gotear naturalmente. No sacuda la orina atrapada en la rejilla.

4. Puede recoger la orina en un envase limpio y seco, y sumergir solamente el área de la rejilla debajo de la marca de la limitación por 5 a 10 segundos.
5. Vuelva el casquillo y coloque el palillo en una superficie limpia y plana con la ventana para arriba. Pues la prueba está trabajando verá un corriente de rosa claro a través del área de la ventana.

LEA SU RESULTADO :

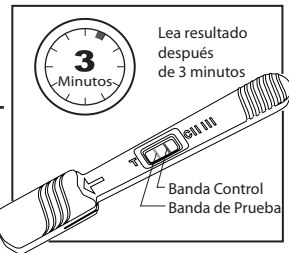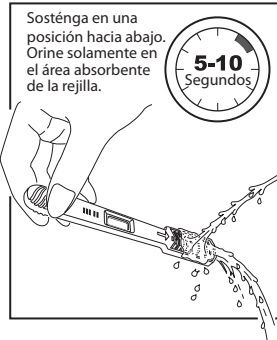Espera por lo menos 3 minutos para leer su resultado. Un resultado positivo se puede observar adentro desde 1 minuto. Para verificar un resultado negativo, permita que la prueba funcione por 5 minutos. No interprete el resultado después de 10 minutos.

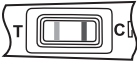

RESULTADO POSITIVO	RESULTADO NEGATIVO	RESULTADO INVÁLIDO
 <p>Una vanda púrpura en el área de la Venda de Control (C) y una vanda púrpura en área de la Venda de la Prueba (T) indica resultado positivo. Una vanda puede ser más débil o más oscura que la otra.</p>	 <p>Solamente una vanda púrpura en área de la Venda de Control (C) y ninguna vanda en el área de la Venda de la Prueba (T) indica un resultado.</p>	 <p>Si no hay vanda en las áreas C y T, o solamente una vanda en área T, el resultado es inválido.</p>